



Beta Guard rfu wipes

- ▲ gebrauchsfertige Tücher
- ▲ aldehyd- und alkoholfrei
- ▲ begrenzt viruzid PLUS*
- ▲ VAH-gelistetes Tuchsystem
- ▲ hohe Materialverträglichkeit

 **DrDeppe**



Beta Guard rfu wipes

sind gebrauchsfertige, aldehyd- und alkoholfreie Hygienetücher mit breitem Wirkungsspektrum zur Desinfektion aller Oberflächen und Gegenständen im patientennahen Umfeld wie auch von Oberflächen in der Industrie und in Lebensmittelbereichen. Ideal wenn praxisingerechte Einwirkzeiten erforderlich sind. Die Tücher bestehen aus 100% biologisch-abbaubarem Tuchmaterial mit optimaler Wirkstoffabgabe.

Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Dann die Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Dabei auf eine vollständige Benetzung achten und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Im Lebensmittelbereich die Flächen anschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen.

Zusammensetzung der *Tränklösung:

In 100 g sind enthalten:
0,1 g 2-Phenoxyethanol
0,35 g Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid
0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin

Chemisch-physikalische Daten

Farbe: farblos / klar · Zustand: flüssig
pH-Wert: 8,5 - 10,5 · Dichte: 0.987 - 1.0030 g/ml

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit 2 Jahre. Nach Anbruch 28 Tage anwendbar. Behältnisse gut verschlossen halten. Nur feuchte Tücher verwenden.

Biozid-Reg. Nr. N-83979

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Listungen



CE 0481

Stand: 06/2019

Gebindegrößen

Artikelnummer:

601108
601109
601104
601111
601113

Gebindegröße:

1 x 70 Tücher (Eimer)
6 x 70 Tücher (Nachfüllpack)
12 x 80 Tücher (Flowpack)
12 x 150 Tücher Dose**
12 x 150 Tücher Nachfüllpack**

Wirksamkeiten

Gemäß EN 16615

Praxistest (für Tücher)

Einwirkzeiten

Bakterizidie, Levurozidie (inkl. 4-Feldertest) (hohe Belastung); Bio-Wipes	1 Min.
--	--------

Wirksamkeiten der Tränklösung

bakterizid, levurozid EN 16615 (hohe Belastung)	1 Min.
---	--------

Viruswirksamkeiten (EN14476):

Begrenzt viruzid PLUS	60 Min.
-----------------------	---------

Begrenzt viruzid	1Min.
------------------	-------

Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV HCV, hohe Belastung)	1 Min.
--	--------

Noroviren (hohe Belastung)	30 Min.
----------------------------	---------

Adenoviren (hohe Belastung)	60 Min.
-----------------------------	---------

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung!

**Tücher aus PP-Material; nur Biozid; nicht biologisch abbaubar

Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Hooghe Weg 35 · D-47906 Kempen

T 02152.5565-0 · W www.drdeppe.de